

PEDIATRIC URINE COLLECTOR **小児用 ウーリンコレクター®**


使用説明書

ご使用前に、必ずお読みください。

ÄLCARE

■使用方法

- ①外陰部及び会陰部をきれいに拭き、よく乾かします。
- ②接着部の剥離紙をはがしてください。
- ③接着面の下部を会陰部にあて、上方へと貼り上げていきます。このとき下部が肛門にかからぬようご注意ください。
- ④採尿終了後はバッグをはずし、接着面を2つ折りにして貼り合わせると、持ち運びに便利です。
- ⑤尿を取り出す時は、バッグ下方中央部をカットし排液口をつくって、他の容器に移してください。

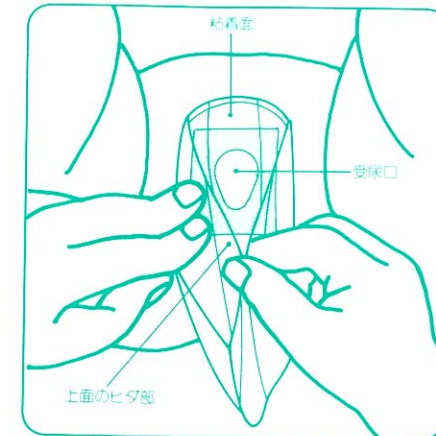

■注意事項

- 患者名を記入する時は油性インクをご使用ください。尚、バッグに記入してある目盛はあくまでも目安としてご利用ください。
- 万一、皮膚に過敏な症状が現われた場合は、使用を中止してください。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都葛飾区新小岩1-2-1 アルカセントラル19階
 TEL 03-5611-7800 (代表) FAX 03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL 03-5638-8161 札幌営業所 TEL 011-261-1721 北陸営業所 TEL 076-243-5602 広島営業所 TEL 082-831-8777
 京都営業所 TEL 048-834-5614 仙台営業所 TEL 022-715-2733 大阪営業所 TEL 06-6337-2985 福岡営業所 TEL 092-441-8372
 静岡営業所 TEL 045-472-7511 名古屋営業所 TEL 052-222-3860
 INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL 81-3-5611-7819

■アルケア衛生学研究所 ■千葉工場 ■オーストラリアサービスセンター